

# ABERTURA ESCANEAMENTO


Para visualizar as imagens de escaneamento sugerimos baixar um dos programas livres disponíveis em nosso site :

( <https://imagemorofacial3d.com.br/requisicao-2/> ).

## Windows: 3Shape\_3DViewer\_Setup.exe


Solicitamos que, após extrair a pasta do escaneamento, siga o seguinte roteiro:

Clique com o botão direito do mouse na opção "abrir com" e selecione o programa 3Shape\_3DViewer\_Setup.exe (Em envios futuros de arquivo STL ou DICOM, o arquivo automaticamente será aberto pelo visualizador designado):

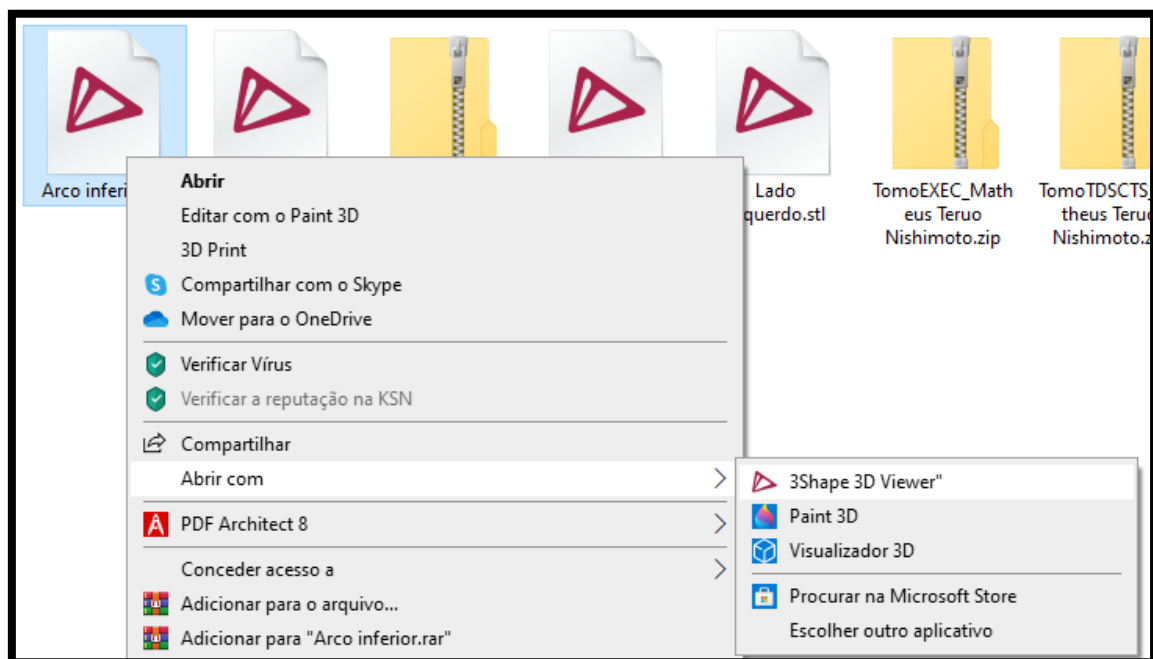

(Caso queira ver apenas o arco designado, seguir o mesmo passo ilustrado)

Caso queira visualizar a vista oclusal de um dos arcos, abra apenas o arquivo desse arco, como na imagem acima. Caso deseje visualizar os arcos em oclusão e todas as suas vistas, abra os arquivos superior e o inferior ao mesmo tempo, ou arraste os arquivos dos dois arcos para o programa já aberto:

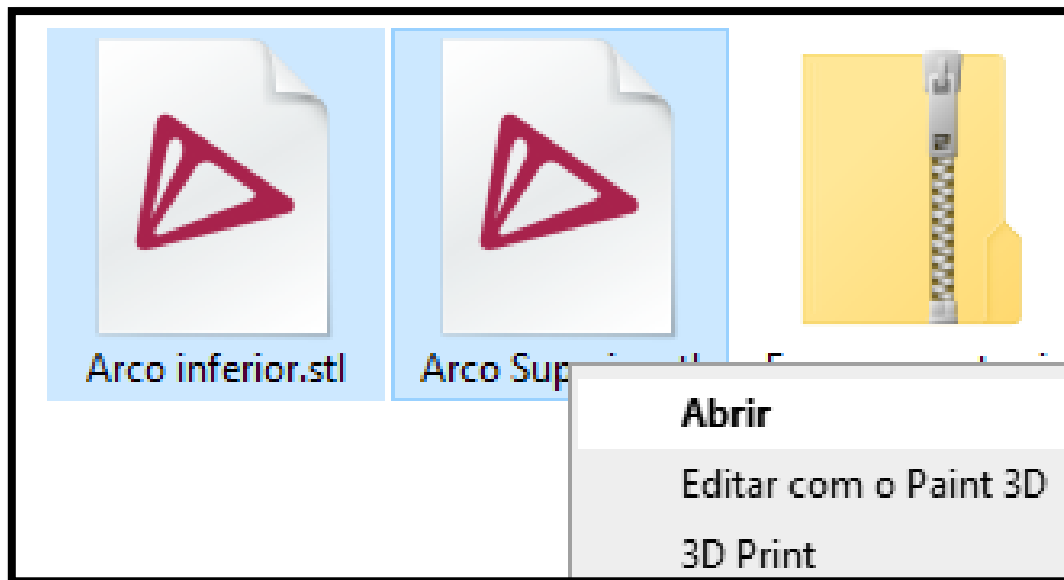

#### **Mac/Windows: Mesh Lab**

Caso queira visualizar a vista oclusal de um dos arcos, abra apenas o arquivo desse arco. Caso deseje visualizar os arcos em oclusão, com todas as suas vistas, abra, ao mesmo tempo, os arquivos dos dois arcos.

**Qualquer dúvida ou dificuldade, favor entrar em contato!**

